

Dog Care

ZECKENENTFERNER



- Einfaches und sicheres Entfernen von Zecken
- Der Zeckenkörper wird nicht gedrückt (Infektionsgefahr)
- Entfernt die Zecke mit Kopf (bis auf sehr seltene Ausnahmen)
- Zwei Zeckenhaken für verschieden grosse Zecken

| Art. Nr. | Bezeichnung/Menge | Preis CHF |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 3482 | Dog/Cat Zeckenhaken 2 Stück | CHF 5.60 |



Eine Zecke muss möglichst schnell und fachgerecht aus der Haut entfernt werden. Die praktischen Zeckenhaken helfen Ihnen dabei, Ihren vierbeinigen Freunden von lästigen Zecken zu befreien.

SPEZIELLE TIPPS

Korrekte Zeckenentfernung

- Je nach Zeckengrösse den richtigen Zeckenhaken auswählen.
- Packen Sie mit dem Schlitz die Zecke indem Sie den Haken auf der Haut aufsetzen und den Körper der Zecke wie aufschaukeln bis sie im Haken klemmt.
- Heben Sie den Haken leicht an.
- Nach ein- oder zweimal drehen löst sich die Zecke.